

Los resultados obtenidos con FibroScan, junto con otras pruebas diagnósticas, ayudará a su médico en el monitoreo de la salud de su hígado.



Para mayor información
Pregunta a tu médico
o hepatólogo.

Mi examinación FibroScan

CITA

Fecha: __/__/----

Hora: __/__/----

Lugar: -----



Rápido,
valoración
sin dolor
de la salud
de tu hígado



SANDHILL
SCIENTIFIC
a medovations company

Corporate Headquarters
102 East Keefe Avenue
Milwaukee, WI 53212 USA
800.558.6408 or 414.265.7635
Fax 414.265.7628

sales@sandhillsci.com
orders@sandhillsci.com

Technical Research & Training Center
9150 Commerce Center Circle #500
Highlands Ranch, CO 80129 USA
800.558.6408 or 303.470.7020
Fax 303.470.2975

technicalsupport@sandhillsci.com
clinicalsupport@sandhillsci.com
clinicateducation@sandhillsci.com

FibroScan502touch.com

FibroScan touch **502**



«Rápido y sin dolor, FibroScan hace el seguimiento de mi enfermedad más conveniente.»

¿Qué es FibroScan?

Es una examinación con FibroScan que utiliza una tecnología llamada Elastografía por vibración transitoria controlada (EVTCTM); es un examen no invasivo que se utiliza para valorar y evaluar la rigidez del hígado.

FibroScan está indicado para la medición no invasiva de la velocidad de la onda de corte y su equivalencia con la rigidez en el hígado. La velocidad de la onda de corte o la rigidez puede ser utilizada como una ayuda para la gestión clínica de la enfermedad hepática

El resultado es inmediato y muestra la evolución de la salud del hígado.



¿Es doloroso? No.

La examinación con FibroScan es sin dolor, rápido y fácil. Durante el examen, usted sentirá una leve vibración sobre la piel generada por la punta de la sonda.

¿En qué consiste el examen con FibroScan?

Usted se recuesta boca arriba, con el brazo derecho elevado y ubicado detrás de la cabeza. El técnico o enfermera aplica gel a base de agua en su piel y ubica la sonda en su piel con una leve presión.

- La examinación incluye 10 mediciones consecutivas realizadas en la misma ubicación.
- El resultado se entrega al finalizar el procedimiento. Su doctor interpretará y le explicará el resultado.

¿Puedo comer antes del examen?

Usted deberá tener un ayuno de 2 a 3 horas antes del examen.

¿Cómo me visto para el examen?

El examen con FibroScan se realiza al lado derecho del cuerpo debajo del brazo derecho al nivel de las costillas. Los pacientes deberán ir al examen con una blusa o ropa cómoda que pueda ser desabotonada para descubrir la región de piel a ser utilizada durante el examen.


¿Cuánto tiempo dura el examen?

La examinación completa FibroScan dura de 15 a 20 minutos y los resultados son reportados una vez finalizado el examen.

« Mi médico me recomendó probar FibroScan »



Las sondas FibroScan se adaptan a todo tipo de cuerpo.

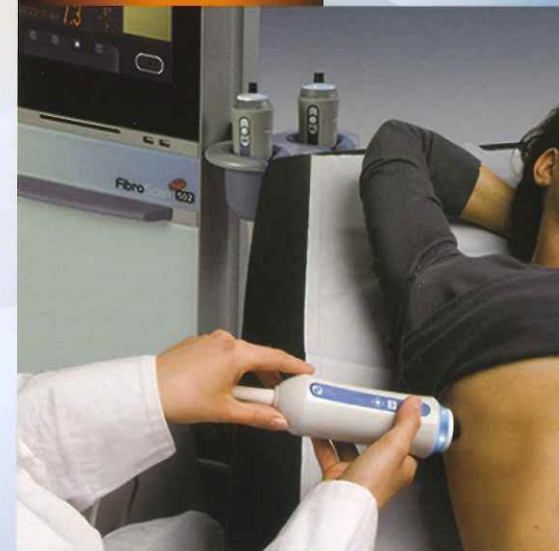

¿Qué hacer con el resultado?

- Su médico interpreta los resultados de acuerdo a su historia clínica y su enfermedad.

¿Qué me ofrece FibroScan de diferente?

- La examinación FibroScan es fácil y rápida.
- El examen no es invasivo y sin dolor.
- El examen con FibroScan puede repetirse con seguridad.